

Bedienungsanleitung

Dentalkamera für Pferde

Modell HH WIFI 720 P HD

für Smartphone oder Tablet

Android und IOS – Fotos und Videos



Produkt: Dentalkamera für Pferde

Hersteller: Horst Häußler, Tolstefanz 9, 29482 Küsten

Inhalt:	Seite
1. Bestimmungsgemäße Verwendung	1
2. Lieferumfang	1
3. Technische Daten	2
4. Inbetriebnahme	3-4
5. Wartung, Reinigung, Entsorgung	5
6. Gewährleistung	6

1. **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Dentalkamera darf nur von entsprechend ausgebildeten Personen zur Untersuchung von Pferde Zähnen benutzt werden. Für eine gefahrlose Untersuchung sollte das Pferd gut sediert und das Pferdemaul mit einem Maulgatter geöffnet sein.

2. **Lieferumfang**

Dentalkamera, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Transportkoffer

Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Fragen sorgfältig auf und händigen Sie diese bei Weitergabe der Kamera an Dritte ebenfalls mit aus.

Technische Daten

Kameralinse	cmos
Auflösung	1280*720
Lichtquelle	2 LEDs
Gesamtlänge	53 cm
Gewicht	390 g
Schutzart	IP67 (ohne Schalter)
Akku	3,7 V-1430 mAh
Akku- Zeit	3 Stunden
Ladezeit	4 Stunden
Arbeitstemperatur	-10 bis +40 Grad C
Bildformat	PNG 1280*720
Videoformat	MP4 980*544
Unterstützt	Android und IOS

Inbetriebnahme

Start

Der Akku ist bei Auslieferung geladen.

Zum Aufladen nur das mitgelieferte Kabel benutzen.

Ein LED-Licht am hinteren Ende der Kamera leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, leuchtet das LED-Licht grün.

App-Installation und -Betrieb

Öffnen Sie den Google Play Store/Apple Store und suchen Sie die App „Lyman“ und installieren sie auf Ihr Mobilgerät.



Verbindung WIFI



Schalten Sie die Kamera ein. Gehen Sie an Ihrem Mobilgerät auf Einstellungen-Verbindungen-WLAN und warten ca. 7 Sekunden. Es erscheint das WIFI-Signal (INSCAM-xxxx) und der Name der Kamera. Verbinden Sie sich mit dem WIFI Signal. Geben Sie das Passwort „12345678“ ein. Öffnen Sie die App „Lyman“. Wenn die Verbindung erfolgreich war, erscheinen jetzt Echtzeitbilder. Wenn die Kamera ausgeschaltet war, muss die Verbindung WLAN wieder neu hergestellt werden.

Aufnahme

Wählen Sie über den Knopf **MODE** Fotos oder Videos Aus. Zum Aufnehmen von Bildern den Knopf kurz drücken. Haben Sie Videos gewählt wird der Knopf rot. Zum Aufnehmen Knopf kurz drücken und zum Stoppen wieder kurz drücken.

Wiedergabe

Um gespeicherte Fotos oder Videos anzuschauen, drücken Sie den Knopf **FILE FOLDER**. Wählen Sie oben **PHOTOS** oder **VIDEOS**. Es erscheinen die gespeicherten Aufnahmen. Sie können einzelne Bilder anklicken und vergrößern oder löschen.

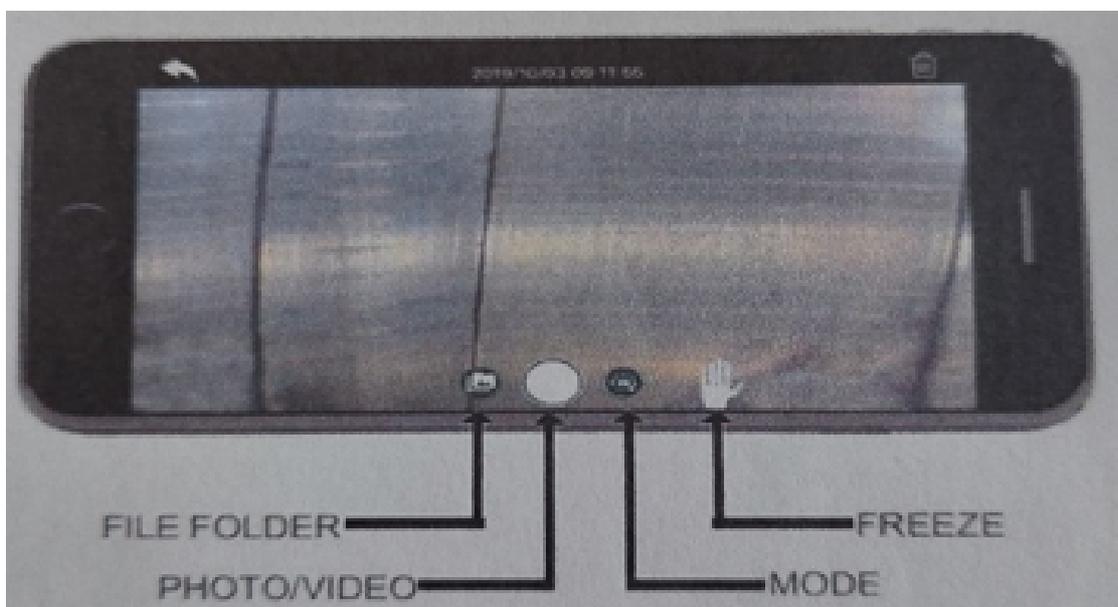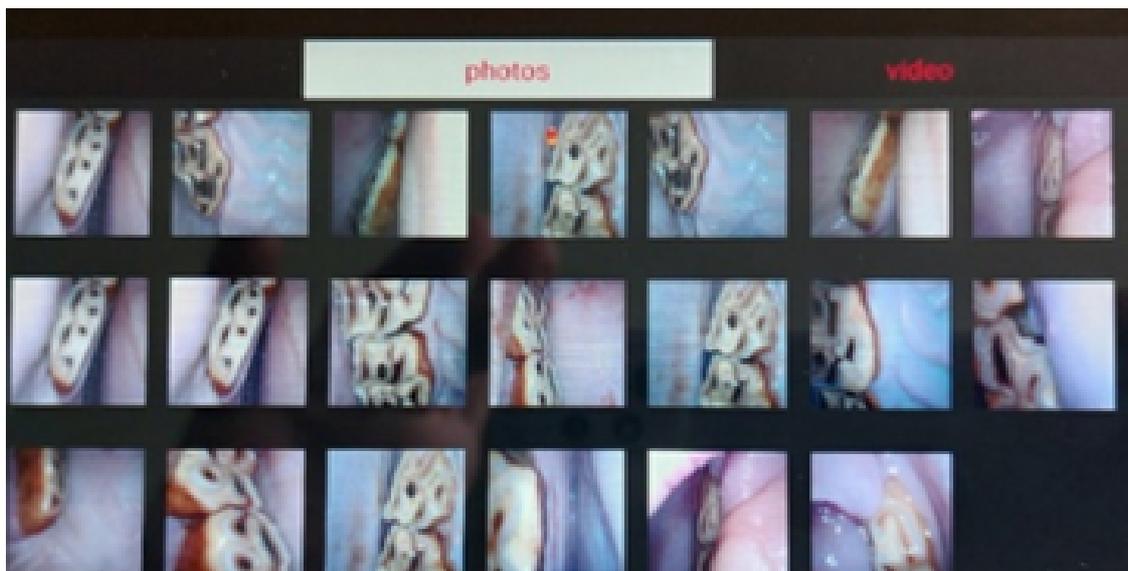

Wartung, Reinigung, Entsorgung

Die Kamera darf nicht in Flüssigkeiten gelegt werden. Bei Bedarf kann die Kamera mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Der hintere Deckel mit dem Ladekabelanschluss und der Drucktaste zum Ein- und Ausschalten dürfen mit Feuchtigkeit nicht in Berührung kommen.

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.

Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Um ein Beschlagen der Kameralinse im Pferdemaul zu verhindern kann sie leicht mit Alkohol besprüht werden

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet diese ordnungsgemäß an Sammelstellen für Altbatterien abzugeben.

Ebenso müssen Altgeräte entsprechend entsorgt werden.

Gewährleistung

Die Dentalkamera wurde sorgfältig produziert und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Für dieses Erzeugnis, Dentalkamera für Pferde, geben wir eine Gewährleistung von einem Jahr ab Liefertag. Die Gewährleistung gilt nur für Material- oder Herstellerfehler, nicht für Beschädigungen. Bei missbräuchlicher Nutzung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen die nicht von unserem Service vorgenommen wurden erlischt die Gewährleistung ebenfalls. Bitte setzen Sie sich im Gewährleistungsfall telefonisch mit uns in Verbindung. In keinem Fall kann auf Schadensersatz geklagt werden im Falle des Schadens an dem behandelten Pferd.

Hersteller und Service

Horst Häußler, Tolstefanz 9

29482 Küsten

E-Mail: horsth1109@gmail.com

Tel.: +49 151 153 14661

Name der Kamera:

INSCAM -

Hergestellt in Deutschland